

アサヒ歯科医院の

「つまようじ法専用歯ブラシ・V7」の消毒管理について



① すべての患者様に無料で新品の歯ブラシを用意しております。油性ペンで氏名を記入し、お預かりします。個人専用です。(約1年・4回のメンテナンスで新しいものと無料で交換します。)



② お預かりした歯ブラシは毎回殺菌消毒し、治療基本セットと共に準備します。



③ 治療が終わるとすぐに、使用した歯ブラシ・歯間ブラシは、まず流水で十分に洗浄します。



④ 漂白剤に浸けた後にステリパワー液（次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸水）にて15分間の超音波洗浄をします。その後水洗・自然乾燥します。



⑤ さらにホルムアルデヒドガス殺菌器（ホルホープデンタル）にて55分間の殺菌を行います。



⑥ ホルホープデンタルはホルマリン（ホルムアルデヒドの37%水溶液）を利用し、オートクレーブのような高圧加熱滅菌ができないプラスチック等の殺菌が可能です。殺菌後のホルマリンの中和消臭も完全です。



⑦ 殺菌が終わった歯ブラシ・歯間ブラシは滅菌パックに封入します。



⑧ 紫外線殺菌庫にて保管致します（紫外線による歯ブラシの劣化を防ぐために約1日間の照射です）。

このように、お預かりした「つまようじ法専用歯ブラシ・V7」は万全な消毒体制で管理しておりますが、もし、ご自分で保管したい場合はお申し出ください（ただし来院時にお忘れの場合はご購入いただくこととなります）。また、ご自分で管理できる歯ブラシ用殺菌スプレーを販売しております。

院長・スタッフ一同